

Reinigung von Silikonprodukten

Langlebig, flexibel und optimal hautverträglich: Mit diesem Hilfsmittel aus Silikon erhalten Sie ein erstklassiges Qualitätsprodukt. Damit Sie den besten Nutzen davon haben, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege, die aus einer einfachen täglichen Wäsche und einer Tiefenreinigung ca. alle 6 Monate besteht.

Alle 6 Monate auskochen für eine komplette Tiefenreinigung



Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Silikon-Hilfsmittel hineinlegen und eine Stunde lang bei 90 °C auskochen.



Das Produkt aus dem Wasser entnehmen, abkühlen lassen und mit einem Handtuch abtrocknen.

Reinigung von Silikonprodukten

Einfach und schnell: Die tägliche Reinigung



Zur Reinigung eine milde Seife verwenden, z. B. Skin Care Waschlotion 10H2.



Mit der Hand die Seife gleichmäßig verteilen.



Alles gut abspülen, innen und außen.



Mit einem Handtuch abtrocknen.